













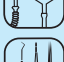




| | Oblast použití | Produkt | Způsob použití | Spektrum dezinfekční účinnosti |
|---|---|--|--|---|
| R U C E * P O K O Ž K A * Ú S T N Í H Y G I E N A |  Hygienická a chirurgická dezinfekce rukou a pokožky | SENSIVA DESDERMAN N DESMANOL | Vetřít do suchých rukou – hygienická dezinfekce 3 ml/30 s, chirurgická dezinfekce 2x 5ml/5 min. Neředit. Příslušenství – dávk. pumpa, nástěnný pákový dávkovač SM2. | A, B, M, V, MRSA |
| |  Hygienické mytí – dezinfekce rukou Antibakteriální mytí všech částí těla | PRIMASEPT Med OCTENISAN | Hygienické mytí a dezinfekce v jednom – 3 ml nanést na ruce, 1 min. vtírat, pak napěnit malým množstvím vody a smýt vodou. Antibakteriální mycí emulze. | A, B, M, V, MRSA dekontaminace, eridikace MRSA |
| |  Hygienická dezinfekce pokožky před chirurgickými zásahy, injekcemi – ošetřování ran, stehů aj. | KODAN Forte též ve formě ubrousků | Aseptická dezinfekce, aplikovat postříkem nebo namočeným tamponem. Neředit. | A, B, M, V |
| |  Antiseptikum na pokožku sliznici, výplachy kanálků a parodont. chobotů, | OCTENIDERM OCTENISEPT | Remanentní účinnost, otěrem, postříkem, oplachem – expozice 30-60 s. Postříkem, příp. potřít navlhčeným tamponem. Použit koncentrát, příp. ředit 1:1. Bez obsahu alkoholu. | A, B, M, V, MRSA též viry včetně HERPES SIMPLEX |
| |  Hygienické mytí a ošetřování pokožky s antimikrobiálními účinky | ESEMTAN Waschlotion OCTENISAN | Nanést na ruce/pokožku, napěnit, smýt vodou. Antibakteriální mycí emulze. | A, pro všechny typy pokožky Dekontaminace, eridikace MRSA |
| |  Ošetření a regenerace rukou a pokožky | ESEMTAN Balzam ESEMTAN olej/AKTIV gel | Vetřít do pokožky a nechat vstřebat. Ošetření pokožky/koupele/prokrvení tkáně. | hydratační a omaštlující, regenerační s vitamíny A, D, E, B a ureou pro všechny druhy kůže. |
| |  Hygiena ústní dutiny - bakteriostatická účinnost | ESEMDENT WHITE – ústní voda | Koncentrát – 1 ml do pohárku vody – výplachy ústní dutiny. Při gingivitidě, parodontóze, stomatitidě aj. Vhodné i do ústních irrigátorů. Výplach ústní dutiny i před čištěním zubů, neředit. Též zubní pasty, zubní kartáčky, nitě ... | Bez cukru a alkoholu. antibakterial/antiplaque |
| N Á S T R O J E |  Dezinfekce a čištění všech druhů nástrojů Vynikající materiálová snášenlivost - kovy, plasty, guma, kaučuk, sklo... (s výjimkou pozinkované oceli) | GIGASEPT INSTRU AF GIGASEPT AF/FORTE | Plochy a dutiny zcela smočít, dále oplach a sterilizace. Doba použitelnosti roztoku až 7 dní. 3%-15 min. • 2%-30 min. • 1,5%-60 min. pro ultrazvuk 3%-5 min. Příslušenství: Dezinfekční vany (3 l; 5 l). K případné alternativě. | A, B, T, M, V, MRSA |
| |  Dezinfekce a čištění všech druhů nástrojů - k alternativ s Gigaseptem FF a Gigaseptem Instru AF Dezinfekce instrumentária a anestet. příslušenství vyšší stupeň dezinfekce | LYSETOL FF LYSETOL V | Plochy a dutiny zcela smočít, dále oplach a sterilizace. Doba použitelnosti roztoku – 10 /7dní. 4% - 15 min. Příslušenství: Dezinfekční vany (3 l; 5 l) Spóry – 10%-15 min., 8%-30 min. Ultrazvuk 4%-5 min. | A, B, T, V, C A, B, T, M, V, C |
| |  Dezinfekce a čištění všech druhů nástrojů - k alternativ s Lysetolem FF a Gigaseptem Instru AF - též pro vyšší stupeň dezinfekce | GIGASEPT FF Neu | Plochy a dutiny zcela smočít, dále oplach a sterilizace Doba použitelnosti roztoku až 7 dní. 6%-15 min. • 4%-30 min. • 10%-4 hod. • sporicidní 8%-16 hod. Příslušenství: Dezinfekční vany (3, 5, 10, 30 l). | A, B, C, T, M, V |
| |  Enzymatické čištění instrumentária | GIGAZYME | Neutrální enzymatický nepěnový koncentrát (použit 0,5–1% roztok). | též v ultrazvuku |
| |  Dezinfekce a čištění jemných rotujících dentálních instrumentů (vrtáků, frézy, diamantových brousků aj.) též pro použití v ultrazvuku | ROTASEPT | Ponořit a nechat působit max 30 min., neoplachovat. Neředit. Příslušenství: Bur box – frezátor. Pro ultrazvuk – 15 min. | A, B, V, T |
| |  Dezinfekce a čištění odsávacích zařízení, odlučovačů amalgámu, výlevek, plivátek apod. vynikající čistící účinnost | ASPIRMATIC ASPIRMATIC CLEANER | Denní aplikace. Propláchnout a umýt roztokem (příslušenství – nádoba). 2%-30 min. 5%-60 min. (event. přes noc, poté proplach). Jednou až dvakrát týdně. | bakterie, houby, viry vč. HBV, HIV, HCV |
| |  Rychlé čištění přístrojů a nástrojů ze skla, kovu, UH, gumy, porcelánu, atd. | S&M LABOR | Ponořit a nechat působit (vhodné i pro ultrazvuk) 0,5%-10 min., při silném znečištění 1%-10 min. | špičková čistící účinnost |
| P L O C H Y * P O V R C H Y |  Rychlá dezinfekce postříkem na lékařské přístroje, operační stoly, inventář, postele, obuv, vyšetřovací lehátka, toalety, stetoskopy, tlakové manžety apod. | MIKROZID Liquid i forma ubrousků MIKROZID SENSITIVE | Nastříkat a nechat zaschnout (velmi rychle zasychá). Neředit/30 s. Otírání koncovek apod. K alternativ na materiály citlivé na alkohol – i ve formě ubrousků. | A, B, M, V, MRSA A, B, M, V (HBV, HIV, rota...) |
| |  Dezinfekce a čištění ploch, zařízení a materiálů všech druhů (kovy, umělé hmoty, podlahy apod.) | TERRALIN Protect BURATON 10F | Plochy navlhčit a otírat hadrem s dezinfekčním roztokem. 0,25%-60 min. • 0,75%-30 min. 1%-30 min. (k alternativ – pro více znečištěné plochy). | A, B, M, V A, B, V, T, C |
| |  Dezinfekce dentálních OTISKŮ a otiskovacích lžic, ploch a povrchů | PERFORM | Přípravek rozpustit ve vodě (2% roztok), ponořit otisk/lžici a nechat roztok působit 10 min. | A, B, (T), M, V, C |

Spektrum dezinfekční účinnosti – legenda: **A** – usmrcení vegetativních forem bakterií a mikroskopických kvasinkových hub. **B** – usmrcení virů – s účinkem na HCV virus. **V** – fungicidní účinek. **T** – usmrcení Mykobakterií Tuberculosis. **M** – usmrcení patogenních mykobakterií. **C** – inaktivace bakteriálních spór.

Kompletní příslušenství – dezinfekční vany (3 l, 5 l, 10 l), frezátor na vrtáčky a malé rotující nástroje, **dávkovací pumpy, rozprašovací hlavice,** dávkovací uzávěr na 20 ml, SM2 – pákový **nástěnný dávkovač** s nastavitelným dávkováním na dezinfekci a mýdlo, **zásobníky** papírových ručníků a toaletního papíru, papírové ručníky, **vonný program** (digitální časové rozprašovače vůní) k provonění prostoru ordinací a čekáren. **Ultrazvukové čistítky** atd.

AGENS J. D. – Ing. J. Dědič, Ledvinova 8 • vzorková prodejna – Ledvinova 4, 149 00 PRAHA 4
Tel./fax: 27 29 25 267, www.agens.cz, e-mail: agens@agens.cz
Okamžitý servis po celé ČR – poradenská služba – individuální konzultace, přednášky
OBJEDNÁVKY: Tel./fax/zázn.: 27 29 25 267, e-mail: agens4@volny.cz